


SISTEMA CH

(Sutura Manguito con Anclaje CorticoHumeral)

El Anclaje CorticoHumeral CH ofrece una técnica simple y reproducible para la reparación artroscópica o mini-open del manguito rotador.


Mediante un instrumental ancilar, las suturas son transportadas desde la zona de reinserción en el troquiter, por vía endomedular, hasta el punto de anclaje cortical en la metáfisis humeral.

Tras la implantación del Botón CH, las suturas son sucesivamente anudadas comprobando la reparación -reinserción del manguito.

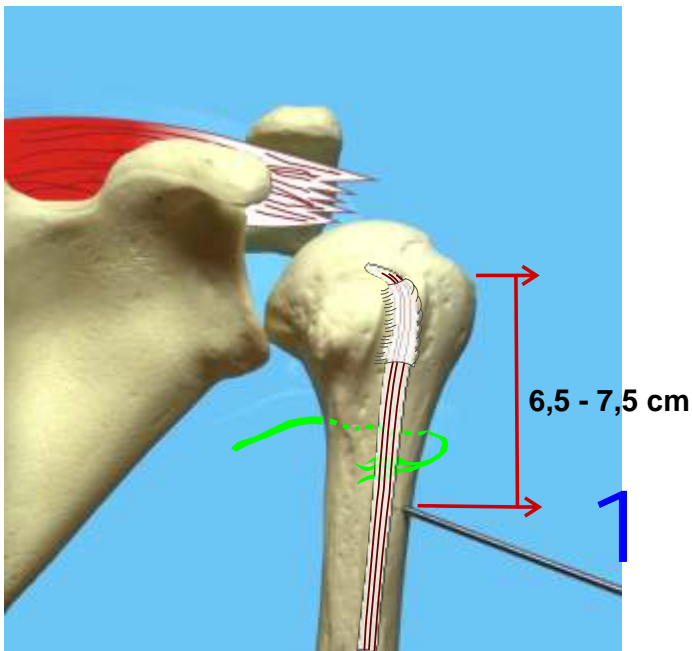

Acceso CorticoHumeral Infra-axilar

Incisión a 6,5/7,5 cm distal a Troquiter
Disección hasta espacio deltobicipital
Colocación de la Guía Centradora y perforación
con una aguja Kirschner de 2,2 mm hasta
cavidad medular.

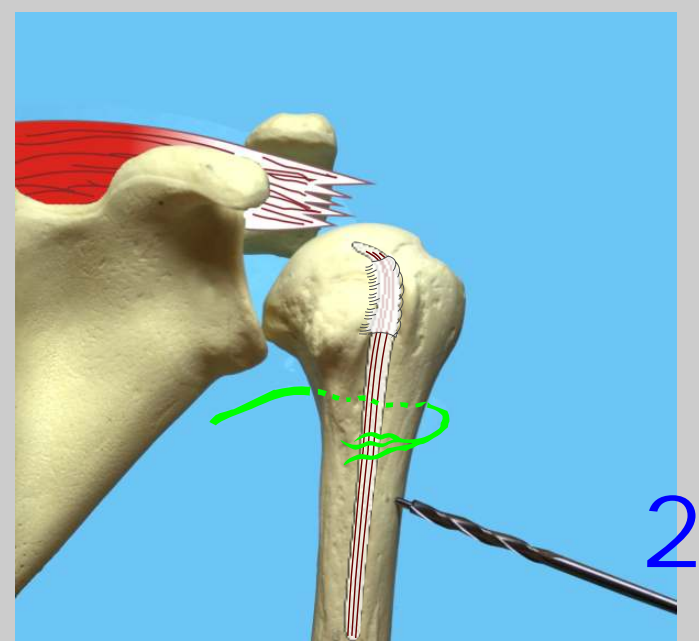

Perforación corticohumeral con broca
canulada de 6 mm



3

Se introduce la parte inferior de la guía en el orificio corticohumeral, y a continuación se desliza y se fija la parte superior hasta la zona de reinserción en el trocitero, en donde se situarán las suturas del manguito.


Se tuneliza mediante perforación motorizada con una cánula-trocar específica de 2mms, desde el trocitero hasta contactar con la cánula inferior.

Se retira el trocar y se desliza una sutura tipo PDS desde proximal, por el interior de la cánula, hasta su captura mediante introducción de una pinza artroscópica de 3,4 mms a través de la cánula receptora.

Tunelización CorticoHumeral


Se utiliza la guía específica CH, la cual consta de una cánula superior que se sitúa en la zona lateral del trocitero y de una inferior receptora alojada en la medular humeral.

Se localizan los puntos de reinserción tendinosa en el trocitero (habitualmente 2 o 3) y se marca con aguja.

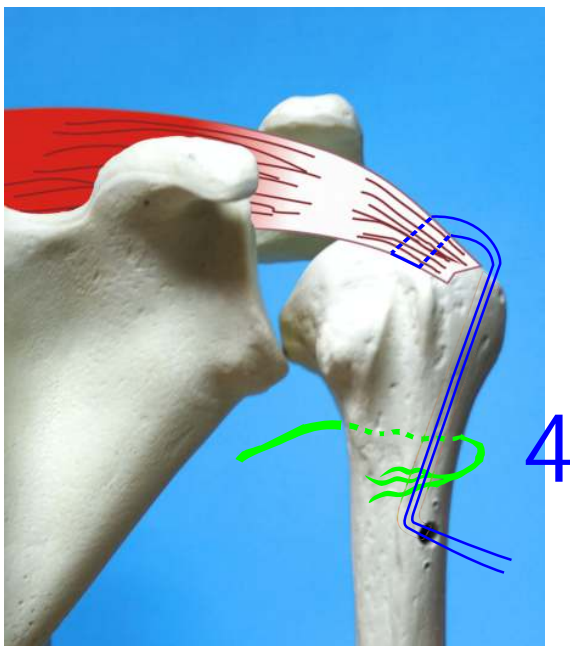


Paso CorticoHumeral de las Suturas del Manguito

Se realizan sucesivos pases de suturas, en ambos sentidos, con el fin de transportar las suturas de reinserción tendinosa hasta su salida por el orificio corticohumeral.

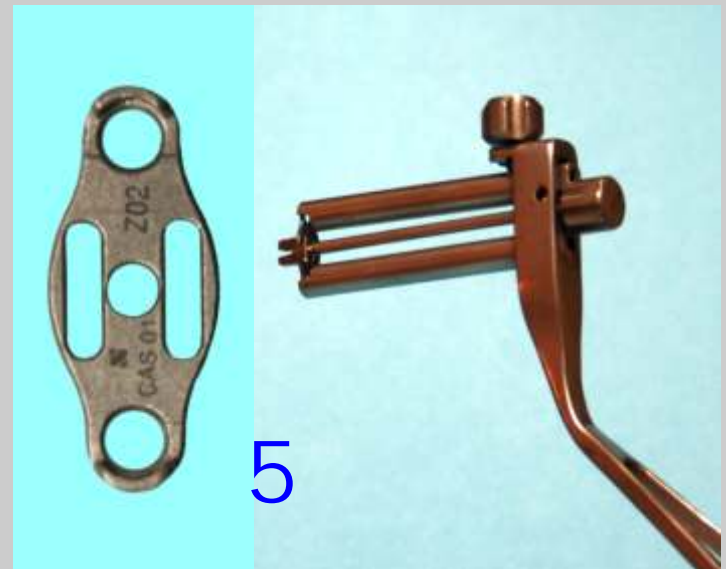

Fijación Botón CH


Botón CH fijado en dispositivo de doble cañón para su introducción en el orificio corticohumeral de 6 mm.

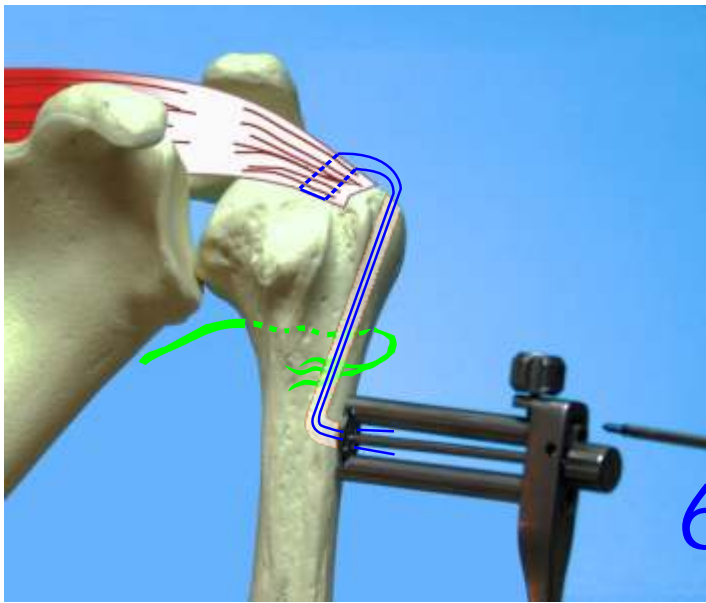

Sutura sobre Botón CH

Enhebrado de las suturas en el Botón CH, comprobando su deslizamiento y adaptación del manguito a la zona de reinserción en troquíter.

Fijación del Botón CH con 2 minitornillos, previa preparación con broca de 1,5 mm.

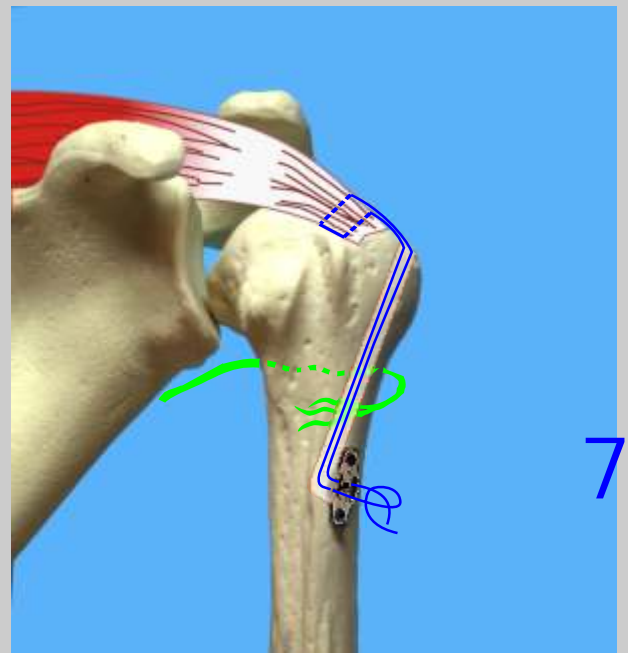

Fijación de las suturas

Mediante el fía-nudos deslizante, las suturas son anudadas sobre el Botón CH.



8



Socinser

Pol. Ind. Rocas
C/Max Planck nº134
Gijón (Asturias)
SPAIN
Tel.: +0034 985 30 70 30